

NASTAVENÍ TENSI+



PŘÍPRAVA DO PROVOZU

Na každou elektrodu umístěte kapku gelu.

Vodivý gel zlepšuje kontakt elektrod s pokožkou.



POZICE

Nasadte si náramek Tensi+ na kotník. Spodní elektroda by měla být umístěna těsně pod a za mediálním malleolem (vnitřní strana kotníku).



UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí .
Rozsvítí se kontrolky LED a ozve se tiché, dlouhé pípnutí.



NASTAVENÍ INTENZITY STIMULACE

Stisknutím a podržením tlačítka  postupně zvyšujte intenzitu setření, dokud neucítíte lehké brnění pod chodidlem. Pokud je brnění nepříjemné, snižte intenzitu tak, že budete držet prst na tlačítku .



OŠETŘENÍ A AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Vaše léčba přípravkem Tensi+ právě začíná. Zařízení se po 30 sekundách nečinnosti uzamkne. Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte tlačítko .

Po 20 minutách se zařízení vypne. Pokud si přejete vypnout zařízení, stiskněte a podržte tlačítko .




VIDEO

V případě pochybností se podívejte na jedno z užitečných videí na našich webových stránkách: tensiplus.com.

Varování :

Před použitím si přečtěte všechny indikace a kontraindikace uvedené v návodu k použití.

VAŠE Tensi+

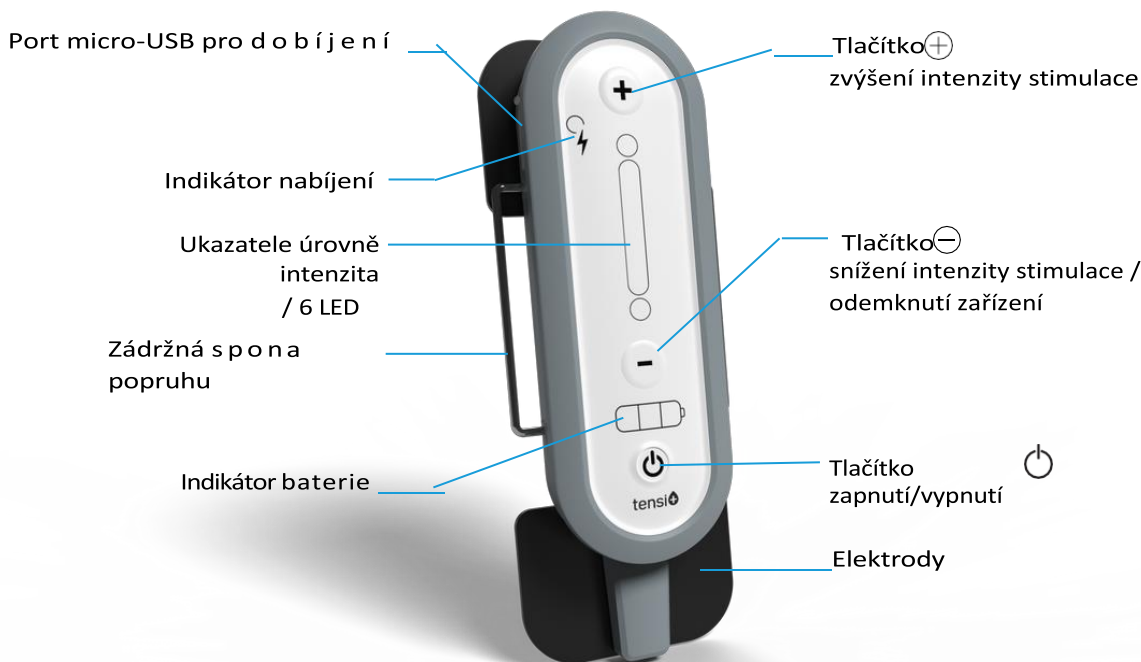

NASTAVENÍ INTENZITY STIMULACE

Pod nohou cítím lehké mravenčení.



POLOHA A KONTAKT JSOU DOBRÉ

Stisknutím tlačítka $\ominus$ mírně snížíte intenzitu. Jakmile přestanete cítit brnění, dosáhli jste komfortní úrovně.

Necítím žádné brnění pod nohou.



ZKONTROLUJTE ZAŘÍZENÍ

Ujistěte se, že je na každé elektrodě dostatek gelu, a/nebo upravte polohu zařízení na kotníku. Někdy uživatelé necítí žádné brnění. To nemusí nutně znamenat, že léčba nebude fungovat. Pokud se tak stane, promluvte si o tom se zdravotnickým pracovníkem, který Vám přípravek Tensi+ předepsal.

Můj přístroj Tensi+ začne během léčby blikat.



Tensi+ JE ODPOJEN

Zařízení Tensi+ se odpojilo od pokožky na dobu delší než jedna sekunda. Mírně přístrojem pohněte, abyste našli holenní nerv, a ujistěte se, že je na každé elektrodě dostatek gelu, který napomáhá vedení. V případě pochybností se podívejte na jedno z užitečných videí na našich webových stránkách: tensiplus.com.

Nejsem schopen zvýšit úroveň intenzity LED diod.



MAXIMÁLNÍ DOSAŽENÉ NAPĚTÍ

Pokud zařízení Tensi+ zůstane na 3, 4 nebo více LED diodách, znamená to, že dosáhlo maximální intenzity 50 mA na základě odporu vaší pokožky. Vaše pokožka má schopnost bránit průtoku elektrického proudu. Zařízení dosáhne vyšší intenzity, když kůže vede více elektriny. Zařízení zůstane na nižší intenzitě, když kůže vede méně elektriny.

**NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, KDE
NAJDETE UŽITEČNÉ TIPY A VIDEA**

www.tensiplus.com



20 bis rue Barthélemy
Danjou 92100 Boulogne-
Billancourt Francie

Stimuli
TECHNOLOGY



tensiplus.com